


Dokument Nr.:	35-06-CL05	Checkliste Vorbehandlung und Versand von kontaminierten Poolinstrumenten	
Version:	1.1		
Gültig ab:	18.05.2020		
Seite:	1 von 2		

1. Nach Anwendung der MP am Patienten

- MP vorreinigen
- MP maschinell oder manuell desinfizieren
- Manuell desinfizieren: MP in Desinfektionslösung einlegen, zBsp. Septo PreClean (bei sermaX AG erhältlich)
- MP mit Wasser abspülen
- MP mit Tuch trocknen, nicht Lufttrocknen



2. MP korrekt verpacken

- MP (mit Spitze nach unten) in weissen Behälter mit grünem Deckel legen
- MP ggf. mit Korrosionsschutzspray besprühen (bei sermaX AG kostenlos erhältlich)
- Grüner Deckel gut verschliessen



3. Bereitstellen für Versand

- Weisser Behälter in blaue Transportkiste geben
- Begleitschein ausfüllen und in blaue Transportkiste legen
- Transportkiste gut verschliessen und Deckel diagonal, mit je einer roten Plombe plombieren (zwingend)
- Versandetikette, falls Transport via Post stattfindet, auf Deckel anbringen
- Transportkiste für Abholung bereitstellen
- Nicht korrektes Material wird nicht mitgenommen!

